

お得に買える
チャンスです!

HAKUSUI

VITA ビタキャンペーン

キャンペーン期間

2024. 6/21(金) ~ 8/20(火)

ビタ イージーシェードV+ ブリーチシェードガイドセット キャンペーン

期間中、ビタ イージーシェードVとビタ ブリーチシェードガイド 3D マスターをセットにして、**特別価格**でご提供いたします。

詳しい製品情報は
カタログをチェック!



CAD/CAM
・ホワイトニングユーザーの
必需品!

タッチパネルで
かんたん!

デジタルシェード
自動測定器



ビタ イージーシェードV

均質なグラデーション!

ホワイトニング用シェードガイド



ビタ ブリーチシェードガイド 3D マスター

ビタパンエクセル/ビタリンゴフォーム 上下2枚セット キャンペーン

期間中、ビタパン エクセル (色: OM3, A2, A3 形態: T46/L35) と
ビタリンゴフォーム (色: OM3, A2, A3 形態: 21L) を
それぞれ上下2枚をセットにして、**特別価格**でご提供いたします。



耐摩耗性が高い!

プラークが
付着しにくい!

上下セット

天然歯に近似した質感!

硬質レジン前歯



ビタパン エクセル

- セット内容
- ・OM3 T46/L35 上下2枚セット
 - ・A2 T46/L35 上下2枚セット
 - ・A3 T46/L35 上下2枚セット

排列しやすいデザイン!

硬質レジン白歯



ビタ リンゴフォーム

- セット内容
- ・OM3 21L 上下2枚セット
 - ・A2 21L 上下2枚セット
 - ・A3 21L 上下2枚セット

シェードテーブル

シェード	OM3	A2	A3

上下セット



詳しい製品情報は
カタログをチェック!





ビタ イージーシェードV

歯面に直接当てて計測することで、シェードの情報を正確に自動測定できます。カラーで見易くなった大きな画面は、タッチパネルで操作も簡単です。

ビタ イージーシェードVで測定できるもの



- ビタ クラシカルシェードガイド A1-D4、ビタ シェードガイド 3D マスター、ビタブロックおよび ADA の規格に沿ったブリーチシェードへの対応
- 天然歯・ブリーチ歯・セラミック修復物全般のシェード決定
- 30 件のデータ保存
- 非接触充電
- 有機発光ダイオードのカラータッチディスプレイ
- Bluetooth® でスマートフォンや PC と連動



鮮明なカラータッチディスプレイ



イーージーシェードVで正確なシェードテイキング



バッテリーが長持ち



人間工学に基づいたデザイン




歯科医師と患者とのコミュニケーション



シームレス構造

ビタ ブリーチシェードガイド 3D マスター

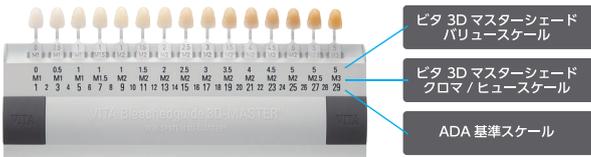

- ビタ 3D マスターシェード バリュースケール
- ビタ 3D マスターシェード クロマ / ヒュースケール
- ADA 基準スケール

一般的な A1-D4 シェードガイドは、明度 / 色調が均等ではありませんが、ブリーチシェードガイドはブリーチ色を含め 3D マスターシェードを基準としているのでホワイトニングのカウンセリングに適しています。

● ご使用方法 ●



通常通りのシェードテイキングを行います。

STEP 1



一番合った色のタブを選択します。ホワイトニング前は 2/M2/13 の色調でした。

STEP 2



ホワイトニング後に再度シェードテイキングします。1/M2/9 になりました。

STEP 3

ビタパン エクセル



新しい形態とコンセプト

ビタパン エクセルは歯頸部に幅をもたせ、天然歯に近いボリューム感を出しています。それにより、自然な配列が可能で、特にインプラントにも適しています。




ビタ リンゴフォーム



並列しやすいデザイン (面コンタクト)

コンタクト部がフラットで、並列が行いやすい設計です。

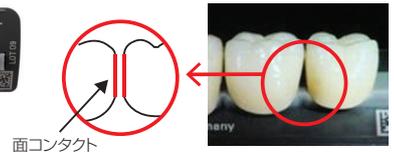

面コンタクト

シェード タイプ(□) 形態




ビタパン エクセル



ビタ リンゴフォーム

ナノハイブリッドフィラーが耐磨耗性をアップ

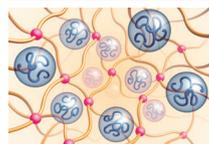


- PMMA粒子
- 架橋ポリマーマトリックス
- 無機フィラー

ビタパン エクセルとビタ リンゴフォームはマイクロフィラーとナノサイズフィラーがハイダブルクロスリンクした構造を持っています。ナノフィラーの含有により口腔内での耐磨耗性、耐ブラーク付着性、耐着色性がさらに向上。光沢が持続します。

MRP+ シラン処理

シラン処理を施すことによりレジンマトリックスと無機フィラーが強く結びつき、耐磨耗性を高めめます。

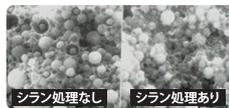

シラン処理なし

シラン処理あり

デンチャーによって調整可能

従来あった歯頸部色や段差をつけていないため、口腔内の歯冠長のバランスに合わせて歯頸ラインを設定できます。歯冠長の調整が可能のため、少ないモールドで対応できます。



従来の人工歯

ビタの人工歯

VITA

白水貿易株式会社

【札幌営業所】〒064-0824 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 TEL(011)616-5814
 【関東北営業所】〒336-0017 さいたま市南区南浦和3-34-2 TEL(048)884-3951
 【東京支店】〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クオスタ12階 TEL(03)5217-4618
 【名古屋営業所】〒464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 TEL(052)733-1877
 【大阪本社】〒532-0033 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 TEL(06)6396-4400
 【広島営業所】〒732-0804 広島市南区西藍屋3-2-1 白通ビル1階 TEL(082)207-2870
 【福岡営業所】〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 TEL(092)432-4618
<https://www.hakusui-trading.co.jp/>

2024.06 P5,000 K16